



GEBRAUCHSANLEITUNG

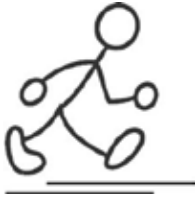

# KidWalk KidWalk II

Dynamische Laufhilfe

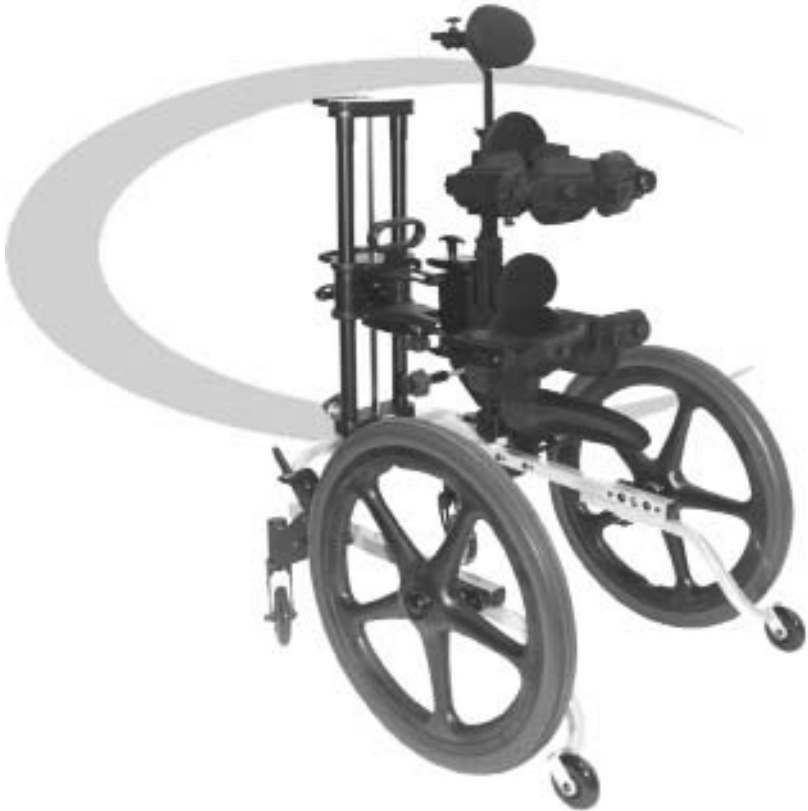

Hergestellt von

**Prime Engineering**

A Division of Axiom Industries, Inc.

Lieferant

70111KWOM





# INHALTSVERZEICHNIS

Die vorliegende Gebrauchsanleitung ist in die folgenden Abschnitte unterteilt:

Beschreibung	Seite
• Allgemeine Hinweise	2–3
Zweckbestimmung/ Nutzungsbeschränkungen	2
Wartung	2
Reinigung und Pflege	2
Schulung	3
Qualität	3
Vorsichtshinweise	3
• Produktabbildung und technische Daten	4
• Teileliste	5
• Montageanleitung	6–8
• Maßnahmen und Ersteinrichtung	9
• Erstanpassungen	11
• Positionierung des Benutzers	13
• Ausstieg des Benutzers	15
• Zubehör	16
• Garantie	24

Darüber hinaus finden Sie in dieser Anleitung eine Reihe von Hinweisen, die Sie bei der Montage und Verwendung des **KidWalk/KidWalk II** unterstützen.

Bei etwaigen Fragen oder für Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns direkt unter:

**1-800-827-8263.**

**\*\*Hinweis:** Lesen Sie vor

Montage und Verwendung des  
**KidWalk/KidWalk II aufmerksam alle  
Anleitungen und Hinweise durch.\*\***



**\*\*Hinweis:** Bitte lesen Sie vor Montage und Verwendung des KidWalk/KidWalk II aufmerksam alle Anleitungen und Hinweise durch. \*\*

**Das Produkt sollte von einem erfahrenen Arzt oder Techniker angepasst werden. Das vorliegende Dokument enthält wichtige Informationen, die dem Benutzer bei Übergabe mitzuteilen sind.**

Vor Ermittlung der richtigen Positionierung des KidWalk/KidWalk II ist unbedingt darauf zu achten, dass der Benutzer auf dem Sitz sitzt und seine Füße ausreichend Kontakt mit dem Boden haben, sodass normales Gehen möglich ist.

## Zweckbestimmung/Nutzungsbeschränkung

### Zweckbestimmung

Das System KidWalk und KidWalk II von Prime Engineering, Inc. ermöglicht dem Nutzer Mobilität, um die eigene Umgebung unabhängig und mit freien Händen zu erkunden und bietet die damit verbundenen Vorteile.

Es unterstützt das Gehtraining bei Krankheitszuständen oder Verletzungsfolgen mit Störung des Bewegungsapparates und gleichzeitiger Koordinations-/Gleichgewichtsstörung bereits in der Frühförderung.

Diagnosen, die die Verwendung von KidWalk indizieren, sich aber nicht nur darauf beschränken sind z.B. Cerebralparese, Muskeldystrophie, Querschnittlähmung, Spinal Muskelatrophie, Down-Syndrom, Spina Bifida und vieles mehr. Kontraindikationen sind nicht bekannt.

Das Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet.

### Nutzungsbeschränkung

- Nur auf ebenem Untergrund verwenden.
- Der KidWalk ist auf eine Sitzhöhe von 9 – 22 Zoll (23 – 56 cm) und ein Benutzergewicht von 65 Pfund (29,5 kg) beschränkt.
- Der KidWalk II ist auf eine Sitzhöhe von 15 – 28 Zoll (38 – 71 cm) und ein Benutzergewicht von 90 Pfund (40 kg) beschränkt.
- Einsatzort: überwiegend im Innenbereich. Außenbereich nur unter Aufsicht bei ebenerdigem Boden in einem abgesicherten Bereich (Garten, Hof, Spielplatz, etc.)

## WARTUNG

Vor jeder Verwendung (u.a. bei Wiedereinsatz):

Das System per Sicht auf lockere oder verschlissene Schrauben und Muttern überprüfen.

Die beweglichen Teile frei von Schmutz und Rost halten, sodass sie frei beweglich sind.

Alle Textilien sind mit Handwäsche sowie einer milden Seife und Wasser zu reinigen. Anschließend an der Luft trocknen lassen.

Jährlich:



Die Verbindungsstücke des Produkts sollten durch einen entsprechend qualifizierten und zuständigen Techniker ordnungsgemäß nachgezogen werden. Das Produkt ist für eine durchschnittliche Lebensdauer von ca. fünf Jahren konzipiert worden. Voraussetzung zum Erreichen der vollen Lebensdauer ist die Durchführung und Einhaltung der in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Anweisungen und Maßnahmen

## REINIGUNG UND PFLEGE

Die Sitz- und Polstertextilien können mit einem neutralen Reinigungsmittel und warmem Wasser, mit einem neutralen Desinfektionsmittel und/oder einem Einwegtuch gereinigt werden.

Keine Reinigungsmittel mit Alkoholen oder Phenolen verwenden.

Die stabilen Komponenten des Produkts können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern und einem weichen Tuch gereinigt werden.

In trockener Umgebung lagern.

## SCHULUNG

Sollten Sie eine zusätzliche Schulung hinsichtlich Montage und Verwendung des **KidWalk/KidWalk II** wünschen, kontaktieren Sie bitte Ihren autorisierten Händler oder Prime Engineering, Inc. unter den in dieser Anleitung angegebenen Kontaktdaten.

## QUALITÄT

Entsprechend unserem Unternehmensleitsatz der kontinuierlichen Verbesserung behalten wir uns das Recht vor, den Aufbau der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Alle Rechte vorbehalten.



## VORSICHT

- Der Kippschutz ist ordnungsgemäß an die großen Räder anzupassen.
- Während der Benutzer sich im System befindet, sind die Gurte geschlossen zu halten.
- Der Rastbolzen zur Befestigung der Aufnahmesäule muss eingerastet sein.
- Die Feststellbremse sind ordnungsgemäß an die großen Räder anzupassen.
- Alle Justierknöpfe müssen angezogen sein.
- Das System auf Höhe der Hüfte nicht zu eng einstellen.
- Den Benutzer des **KidWalk/KidWalk II** nach Platzierung im Hilfsmittel niemals unbeaufsichtigt lassen.



# KidWalk/KidWalk II



**Abbildung des KidWalk/KidWalk II** mit optionaler umfassender Thoraxpelotte

## Technische Daten

	Größe 1	Größe 2
Alter	1 – 7 Jahre	5 – 12 Jahre
Max. Benutzergewicht	29,5 kg	40 kg
Sitzhöhe – Innenbeinlänge	23 – 56 cm	38 – 71 cm
Hüftbreite	14 – 23,5 cm	18 – 29 cm
Rumpfbreite	16,5 – 25,5 cm	22 – 37 cm
Achselhöhe	24,5 – 41 cm	30 – 56 cm
Rumpftiefe, Standard	10,2 – 16,5 cm	14 – 21,6 cm
Hüfttiefe, Standard	8,9 – 15,2 cm	12,7 – 17,8 cm
Gestellbreite	60 cm	68,8 cm
Gestelllänge	67,5 cm	80 cm
Höhe Aufnahmesäule	82,5 cm	93 cm
Gesamtlänge	82,5 – 87,5 cm	90 – 95 cm
Räder	50 cm (20")	60 cm (24")
Rollen	10 cm (4")	12,5 cm (5")
Produktgewicht:	ab 18 kg	ab 18 kg



**Der KidWalk/KidWalk II wird vormontiert und  
in einem einzelnen Versandkarton geliefert.**

In diesem sind enthalten:


Menge	Beschreibung
1	Grundgestell
1	Aufnahmesäule
2	Räder
2*	Achsen
2*	Achsen-Distanzscheiben

\*Die Achsen und Achsen-Distanzscheiben befinden sich in einem verschlossenen Folienbeutel.


### Optional verfügbare Produkte:

Eventuell sind weitere, optional erhältliche Artikel in der Verpackung. Stellen Sie sicher, dass alle im Karton befindlichen optionalen Komponenten und die zugehörigen Gebrauchsanleitungen identifiziert werden.

### Bezeichnung der Komponenten

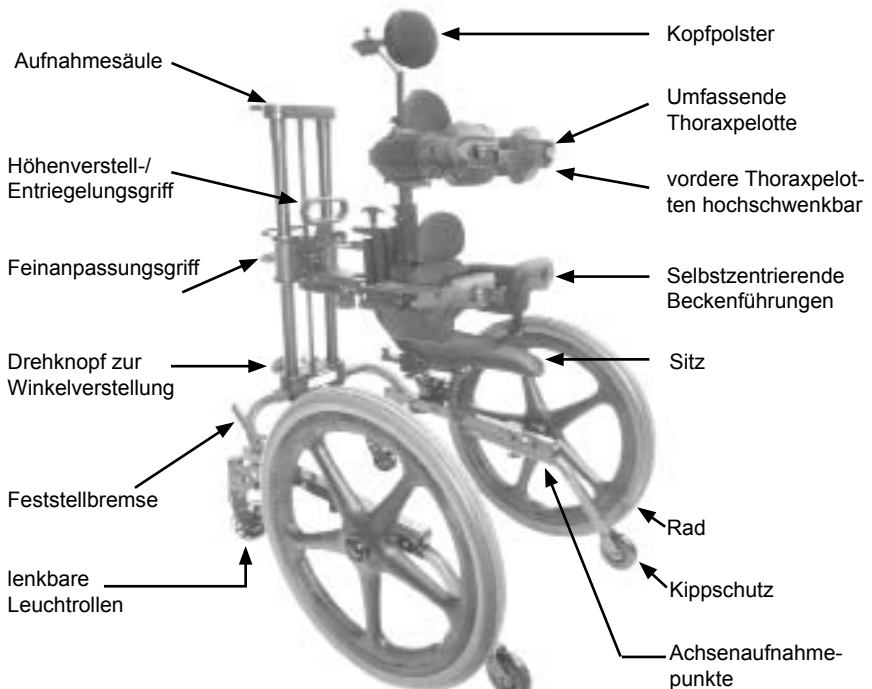

# MONTAGEANLEITUNG

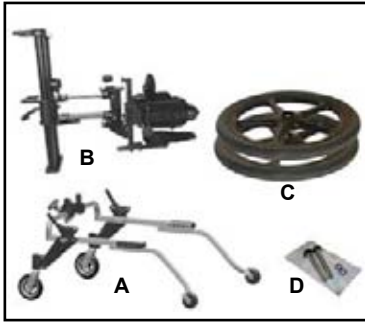

Bei Beachtung der nachfolgenden Anweisungen ist die Montage und Einrichtung des **KidWalk/KidWalk II** einfach und unkompliziert.

Zu Beginn:

Den Versandkarton öffnen und die nachfolgenden Systemteile und Komponenten herausnehmen und identifizieren.

- A** Grundgestell mit Kippschutz
- B** Aufnahmesäule mit selbstzentrierender Beckenführung
- C** Räder (2)
- D** Beutel mit Achsen und Distanzscheiben

- Optionales Zubehör (je nach Bestellung)

## Montage:

- Das Grundgestell wie in Abb. 1 gezeigt auf eine ebene Fläche stellen.



Abb. 1

- Die Achsen und Achsen-Distanzscheiben aus dem Plastikbeutel nehmen. Die Achse von der Seite mit dem tiefliegenden Lager aus in das Rad einstecken (Abb. 2). Dabei den Knopf am Ende der Achse eindrücken, damit die Achse vollständig durch das Radlager geführt werden kann. Wie in Abb. 2 gezeigt auf der Rückseite des Rads eine Distanzscheibe auf die Achse setzen; den Knopf an der Achse dabei gedrückt halten.

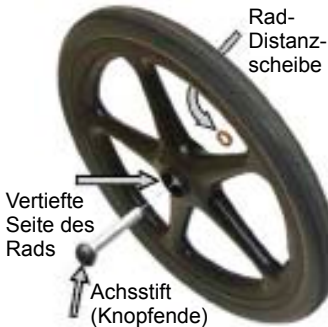


Abb. 2

- Das Rad mit der Steckachse in die mittlere Position der Radaufnahmen am Grundgestell stecken (Abb. 3). Diesen Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

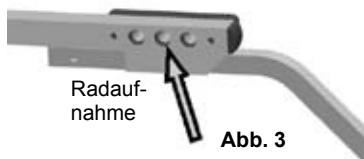


Abb. 3

**Hinweis: Verwenden Sie für die Ersteinstellung immer die mittlere Öffnung.**

*Die Feststellbremsen und der Kippschutz sind auf die mittlere Achsenposition voreingestellt.*





# MONTAGEANLEITUNG

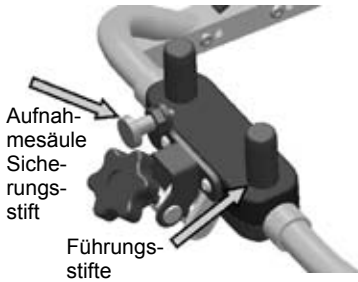


Abb. 4

- Den Sicherungsstift für die Aufnahmesäule an der Hinterseite des Grundgestells ziehen und eine viertel Umdrehung drehen, damit er festgestellt ist (Abb. 4).
- Die Aufnahmesäule auf die Führungsstifte am Grundgestell setzen (Abb. 5). **Den Sicherungsstift drehen, bis er in die Aufnahmesäule einrastet.** Sicherstellen, dass der Entriegelungsstift vollständig eingerastet ist und die Aufnahmesäule fest mit dem Grundgestell verbindet. Wenn sich die Aufnahmesäule vom Grundgestell abheben lässt, den Sicherungsstift weiter drehen, bis dieser in die Aufnahmesäule einrastet.

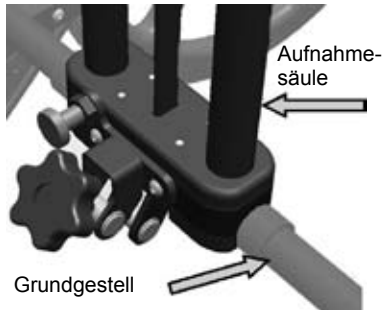


Abb. 5

**Hinweis:** Es ist darauf zu achten, dass die Aufnahmesäule immer fest am Grundgestell befestigt ist.

**Hinweis:**  
Der KidWalk/KidWalk II darf nur mit Kippschutz und Sitz verwendet werden. Den Kippschutz NICHT entfernen bzw. das System zu keiner Zeit ohne Kippschutz und Sitz verwenden.

## Montage des optionalen Zubehörs:

Hinweis: Falls Sie optionales Zubehör erhalten haben, welches hier nicht aufgeführt ist, finden Sie die Hinweise zur Montage und Verwendung in den Anleitungen, die den jeweiligen Artikeln beiliegen.

## umfassende Thoraxpelotte

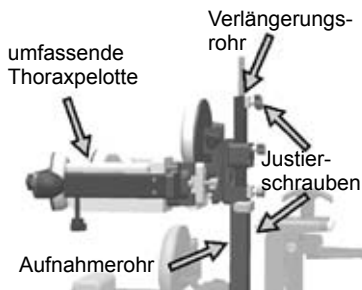


Abb. 6

- Schieben Sie das Verlängerungsrohr durch die entsprechende Aufnahme an der umfassenden Thoraxpelotte (Abb. 6).
- Dann das Verlängerungsrohr in das obere Ende des Aufnahmerohrs schieben. Die Polster auf die passende Höhe einstellen und beide Justierschrauben anziehen (Abb. 6).



# MONTAGEANLEITUNG

## Kopfstütze

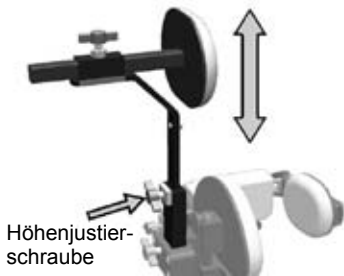


Abb. 7

- Die Kopfstütze in das Erweiterungsrohr einstecken, wobei das Polster nach vorne zeigen muss. Anschließend die Justierschraube anziehen (Abb. 7).

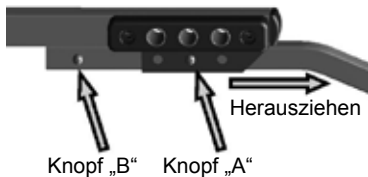


Abb. 8

## Lenkbare Laufrollen

(Nicht erhältlich für KidWalk II)

- Die Kippschutzarme von dem Grundgestell abnehmen. Dazu den Druckknopf „A“ für die Positionseinstellung eindrücken (Abb. 8) und den Kippschutz soweit wie möglich herausziehen. Dann den Halteknopf „B“ am Ende des Kippschutzes drücken und den Arm vollständig aus dem Grundgestell gleiten lassen.

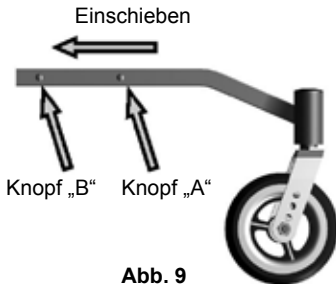


Abb. 9

- Den Knopf „B“ an den lenkbaren Laufrollen eindrücken und in die Aufnahmevorrichtung der Kippschutzaufnahme einschieben (Abb. 9). Den Knopf „A“ eindrücken und das Rohr nach hinten schieben, bis der Knopf in das mittlere Loch der Kippschutzaufnahme einrastet.

**\*\*Hinweis: Den KidWalk/KidWalk II nur mit dem zugehörigen Kippschutz oder den lenkbaren Laufrollen verwenden. Stets den Kippschutz wieder in den Rahmen einsetzen, wenn die lenkbaren Laufrollen nicht mehr verwendet werden.\*\*** (lenkbare Laufrollen nicht für KidWalk II erhältlich.)



# MASSNEHMEN UND ERSTEINRICHTUNG

## Maßnahmen:

Die folgenden Körpermaße sollten abgenommen und notiert werden, um eine ordnungsgemäße Einrichtung des **KidWalk/KidWalk II** zu ermöglichen:

- Schritthöhe \_\_\_\_\_ Zoll (cm)
- Hüftbreite \_\_\_\_\_ Zoll (cm)
- Brustbreite \_\_\_\_\_ Zoll (cm)
- Brustkorbhöhe\* \_\_\_\_\_ Zoll (cm)
- Kopfhöhe\* \_\_\_\_\_ Zoll (cm)

\*Die Maße der Brustkorb- und Kopfhöhe sind ab dem oberen Ende des Schritts zu messen. Diese Maßangaben werden benötigt, um die für den **KidWalk/KidWalk II** optional erhältliche umfassende Thoraxpelotte und/oder das Kopfpolster bzw. die Kopfstützen einzustellen.

## KidWalk/KidWalk II Erstanpassungen:

### Sitzhöhe:

- Die Sitzhöhe mit dem Höhenverstell-/Entriegelungsgriff oder dem Feinanpassungsgriff (Abb. 10) auf 1 Zoll (2,5 cm) über der gemessenen Schritthöhe einstellen.
- **Um den Sitz** mithilfe des Höhenverstell-/Entriegelungsgriffs anzuheben, mit einer Hand von oben auf die Aufnahmesäule drücken und mit der anderen Hand den Höhenverstell-/Entriegelungsgriff nach oben ziehen.
- **Zum Anheben des Sitzes** mit der Feinanpassung die Hand durch den Feinanpassungsgriff führen und den unteren Teil des Griffs nach oben ziehen (Abb. 10). Mit jedem Zusammendrücken des Feinanpassungsgriffs wird der Sitz um einen halben Zoll (1,3 cm) angehoben.
- **Um den Sitz abzusenken**, einfach den Höhenverstell-/Entriegelungsgriff leicht nach unten drücken (Abb. 10). Zum Absenken des Sitzes an der Aufnahmesäule ist nur ein minimaler Kraftaufwand nötig. **Den Sitz nicht zu kraftvoll nach unten drücken.** Sobald der Höhenverstell-/Entriegelungsgriff nicht weiter nach unten gedrückt wird, verbleibt der Sitz auf der aktuellen Höhe. (Der Sitz kann nicht abgesenkt werden, wenn er mit Gewicht belastet ist.)

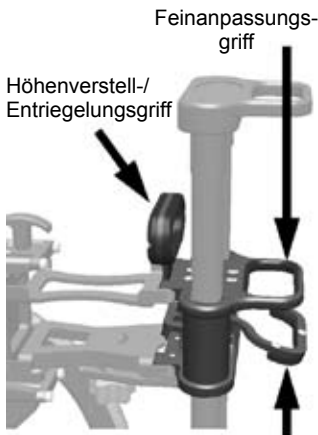


Abb. 10



# MASSNEHMEN UND ERSTEINRICHTUNG

## **Weitere Artikel:**

Es sollte darauf geachtet werden, dass alle Pelotten auf eine für den Benutzer passende Höhe und Breite eingestellt sind. Alle optionalen Artikel gemäß den Angaben der hier vorliegenden Anleitung auf die passenden Maße für die Höhe und Breite einstellen.

**HINWEIS:** *Alle tiefenverstellbaren Polster soweit nach vorne einstellen, dass der Benutzer in das System passt, wenn die Polster nach unten geklappt werden.*



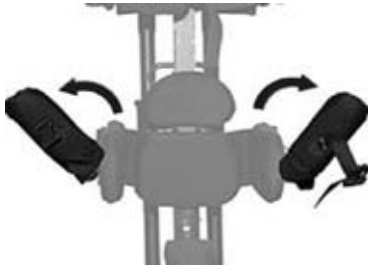


Abb. 11

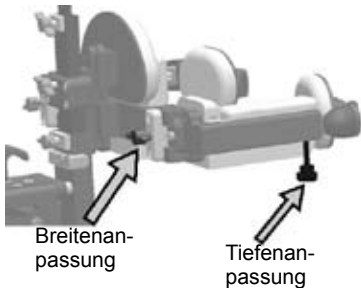


Abb. 12

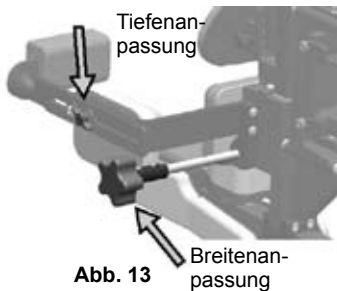


Abb. 13

## Beckenführung

- Die vorderen Polster der Beckenführung nach oben und außen klappen (Abb. 11). Falls der **KidWalk/KidWalk II** zudem oben mit umfassenden Thoraxpelotten ausgestattet ist, auch diese nach oben und außen klappen.
- Den Abstand zwischen den Beckenpolstern über den Drehknopf an der Außenseite der Beckenpolster (links vom Benutzer; Abb. 13) so einstellen, dass der Benutzer leicht zwischen die Polster gesetzt werden kann. Bei Drehung des Knopfes im Uhrzeigersinn wird der Abstand zwischen den Polstern vergrößert und bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn verkleinert.

## **umfassende Thoraxpelotten**

(optionaler Artikel)

- Die Drehknöpfe auf der Rückseite der oberen Thoraxpolster lösen (Abb. 12). Die Polster danach so weit nach außen schieben, dass der Benutzer mit seinem Oberkörper hindurch passt (diese Polster werden neu eingestellt, nachdem der Benutzer im **KidWalk/KidWalk II** platziert wurde).

**HINWEIS:** Drehen Sie die Klapppolster zum Einsetzen des Benutzers in das System nach vorne und ziehen Sie die Justierknöpfe fest, damit die Polster vorübergehend in Position bleiben.

## **Platzieren des Benutzers im KidWalk/KidWalk II**

- Zunächst die Feststellbremsen anziehen.
- Dann den Benutzer in das System setzen, wobei darauf zu achten ist, dass die Hüften möglichst weit nach hinten in den **KidWalk/KidWalk II** geschoben werden. Sobald der Benutzer hinten im Sitz platziert wurde, die vorderen Polster nach unten klappen. Dann die vorderen Hüftpolster in Richtung des Benutzers schieben, bis diese passgenau sitzen und die Hüfte



# ERSTANPASSUNGEN

des Benutzers in Position halten. Den Drehknopf für die Tiefenanpassung wieder fest anziehen (Abb. 13).



Abb. 14

## Anpassung des Hüftabstands

- Den Abstand zwischen den Stützelementen im Hüftbereich mit dem Drehknopf an der Außenseite der Beckenpolster so einstellen, dass die Elemente passgenau an den Hüften des Benutzers sitzen.
- Die Schnallen schließen und den Gurt fest anziehen (Abb. 14).

**Hinweis:** Positionieren Sie die Hüfte des Benutzers soweit hinten wie möglich. Je weiter hinten der Benutzer auf dem Sitz sitzt, umso besser.



# ERSTANPASSUNGEN/POSITIONIERUNG DES BENUTZERS

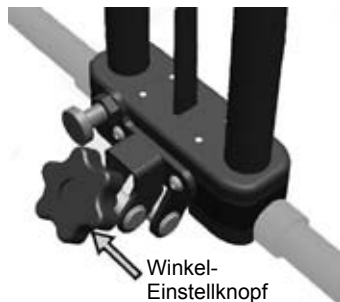


Abb. 15

## Winkel Aufnahmesäule (einstellbar)

Sobald der Benutzer im **KidWalk/KidWalk II** platziert und alle Stützelemente passend eingestellt wurden, kann es erforderlich sein, auch den Winkel der Aufnahmesäule anzupassen. Die Aufnahmesäule des **KidWalk/KidWalk II** kann bei Bedarf nach vorne oder nach hinten abgewinkelt werden. Dabei sollte die Aufnahmesäule in kleinen Schritten bewegt werden, um die Positionierung des Benutzers zu unterstützen oder den Gang zu verbessern.

Mit Drehung des Winkel-Einstellknopfs (Abb. 15) im Uhrzeigersinn wird die Säule nach vorne und bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn nach hinten abgewinkelt.

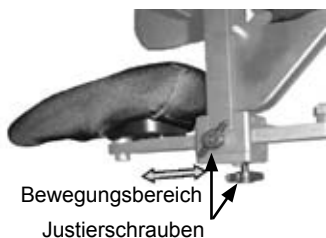


Abb. 16

## Sitztiefeanpassung

Der Sitz ist ab Werk an die mittlere Achsenposition am Rahmen angepasst. Falls eine Anpassung der Sitztiefe erforderlich ist, die zwei Justierschrauben lösen (Abb. 16). Den Sitz wie erwünscht nach vorne oder hinten schieben und die Schrauben wieder festziehen.

**Hinweis: Sicherstellen, dass die beiden den Sitz haltenden Schrauben wieder fest angezogen wurden.**



Abb. 17

## Veränderung der Radposition

Das große Rad kann in drei unterschiedlichen Positionen montiert werden. Um die Position zu verändern, das Rad mit gedrücktem Achsenstiftknopf (Abb. 17) nach außen vom Rahmen abziehen. Das Rad bei gedrücktem Achsenknopf in die neue Position einsetzen. Nachdem das Rad in der neuen Position ist, überprüfen, dass die Achse vollständig eingerastet ist und sich nicht wieder abziehen lässt.

**Hinweis: Sobald die Position des Rads auf dem Rahmen verändert wurde, muss auch die Feststellbremse entsprechend angepasst werden (siehe „Veränderung der Feststellbremsenposition“).**



# POSITIONIERUNG DES BENUTZERS

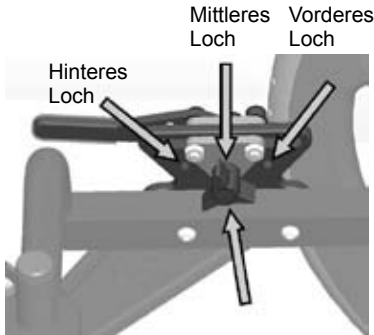


Abb. 18

## Veränderung der Feststellbremsenposition

- Die Feststellbremse ist ab Werk auf die mittlere Radposition voreingestellt. Sobald die Position der großen Räder verändert wird, müssen auch die Feststellbremsen entsprechend angepasst werden.
- Um die Position der Feststellbremse zu verändern, zunächst die Flügelschraube abdrehen (Abb. 18). Daraufhin die Feststellbremse nach vorne oder hinten verschieben, sodass sie mit der neuen Radposition übereinstimmt. Das Gewindeloch für die Flügelschraube mit dem vorderen oder hinteren Loch ausrichten (Abb. 18). Abschließend die Flügelschraube wieder einsetzen und festziehen.

**Hinweis: Vor der Verwendung überprüfen, ob die Feststellbremsen richtig angepasst sind. Die Feststellbremsen müssen immer richtig angepasst sein, um ein Sperren der großen Räder zu ermöglichen.**

## Optionales Zubehör:

### Umfassende Thoraxpelotten

#### Höhenverstellung

Die umfassende Thoraxpelotte auf dem Erweiterungsrohr nach oben oder unten schieben, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Dann die Justierschraube fest anziehen (Abb. 19).

#### Abstands Anpassung

Die Polster nach innen schieben, bis in der gewünschten Oberkörperhaltung Kontakt zwischen Polster und Körper besteht. Dann die Justierschrauben anziehen (Abb. 19).

Die vorderen lateralen Polster nach unten in Position klappen, die Schnalle schließen und die Gurte festziehen.

#### Tiefenanpassung

Die Tiefe der vorderen Brustpolster so anpassen, dass der Oberkörper fest gegen das Polster im Rücken gehalten wird (Abb. 19).

#### Kopfpolster

Die Höhe und Tiefe des Kopfpolsters auf die gewünschte Position einstellen und die Justierknöpfe festziehen (Abb. 20).

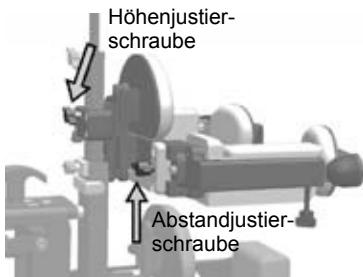


Abb. 19

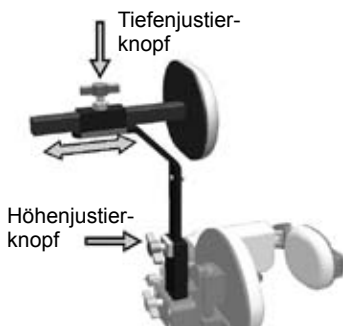


Abb. 20





# AUSSTIEG DES BENUTZERS TRANSPORT UND LAGERUNG

## Ausstieg des Benutzers

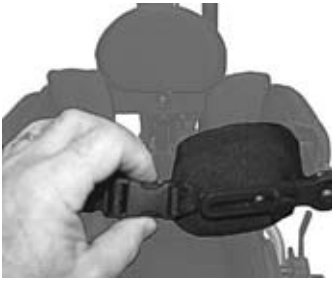


Abb. 21

Herausnehmen des Benutzers aus dem **KidWalk/KidWalk II**

- Zunächst die Feststellbremsen anziehen.
- Die zwei Seiten der Schnalle an den vorderen Polstern der Hüftelemente (und falls zutreffend der umfassende Thoraxpelotte) zusammendrücken und lösen (Abb. 21).
- Die vorderen Polster nach oben und nach außen klappen, um einen freien Ausstieg aus dem System zu ermöglichen.
- Falls zutreffend, alle weiteren Fixierungen lösen, d. h. elastische Beinführung, weicher Rumpfgurt oder Beinführungsgurte zur Befestigung am Sitz.
- Den Benutzer nach vorne vom Sitz heben.

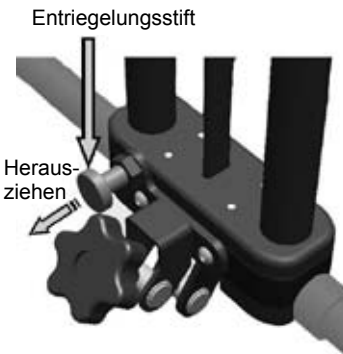


Abb. 22

## Transport und Lagerung

Für den leichteren Transport oder die einfache Lagerung kann der **KidWalk/KidWalk II** demonstrierter werden.

Die Aufnahmesäule lässt sich abnehmen, indem der Entriegelungsstift herausgezogen und gedreht wird, bis er sich in der Sperrposition befindet. Nun kann die Aufnahmesäule nach oben vom Grundgestell abgenommen werden.

Falls notwendig, können zudem die großen Räder abgenommen werden. Dazu den Knopf auf dem Achsenstift nach innen drücken und das Rad gleichzeitig nach außen abziehen.


**HINWEIS: Achten Sie darauf, die Distanzscheiben auf den Achsen nicht zu verlegen (gilt nur für Speichenräder).**



## Lenkstopp

KidWalk/KidWalk II Nachrüstset

### Installationsanleitung

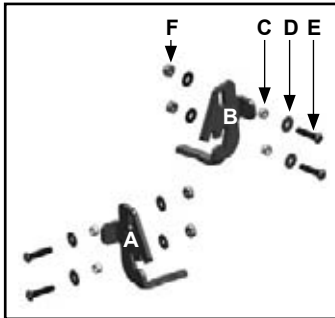

#### Schritt 1


Kontrollieren Sie, ob ihr Nachrüstset folgendes enthält:

- 1 Linksschwenk-Sperrplatte (A)**
- 1 Rechtsschwenk-Sperrplatte (B)**
- 4 Distanzhalter (C)**
- 8 Unterlegscheiben (D)**
- 4 Halbrundkopfschrauben (E)**
- 4 Mutter (F)**




#### Schritt 2

Die beiden Inbusschrauben (A), die die Lenkradbaugruppe (B) halten, an der Lenkradplatte (C) fixieren.

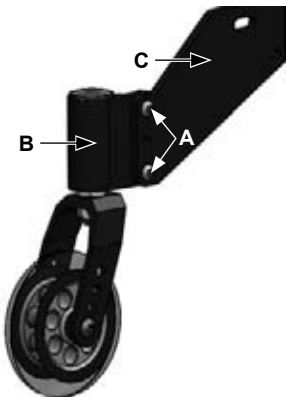

#### Schritt 3


Die beiden Muttern (E) und Bolzen (D) entfernen.

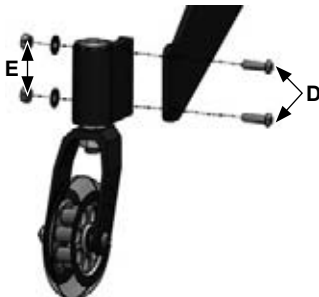



## Schritt 4

Die Feststellung wie abgebildet montieren.  
Verfahren Sie auf der gegenüberliegenden Seite wie zuvor beschrieben.

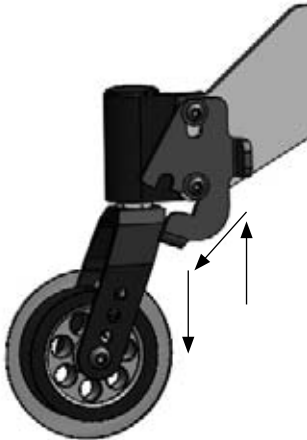

## Schritt 5

Anheben - dann nach vorne schieben und in Sperrposition absenken.

## SPERRPOSITION



## Schritt 6

Anheben - dann schieben und in entriegelte Position absenken.

## ENTRIEGELTE POSITION



## Rücklaufstopp


KidWalk/KidWalk II Nachrüstset



### Installationsanleitung



#### Serien-Bremsbaugruppe

#### Explosionszeichnung

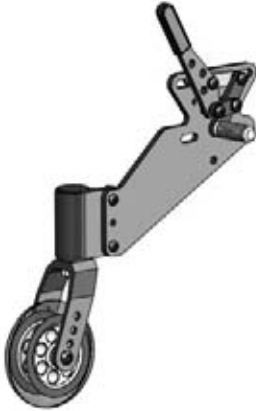

#### Montage Rücklaufstopp für 20 Zoll Rad mit Kunststofffelge


#### Montage Rücklaufstopp für 20 Zoll Speichenrad

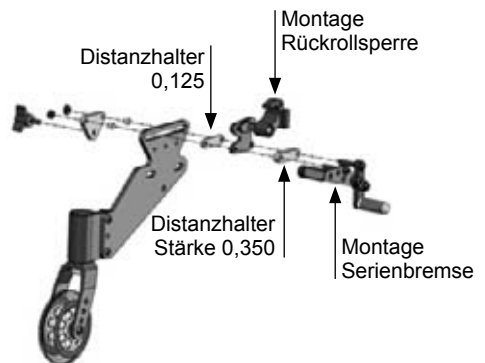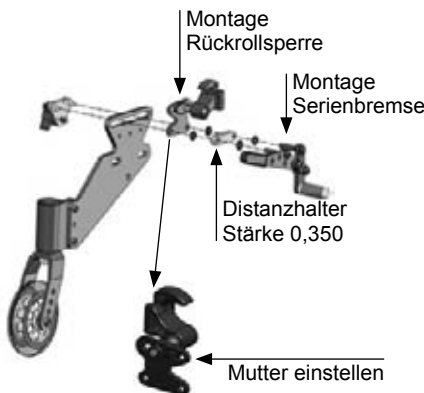

## KidWalk Größe 2 24 Zoll montiert



### Explosionszeichnung

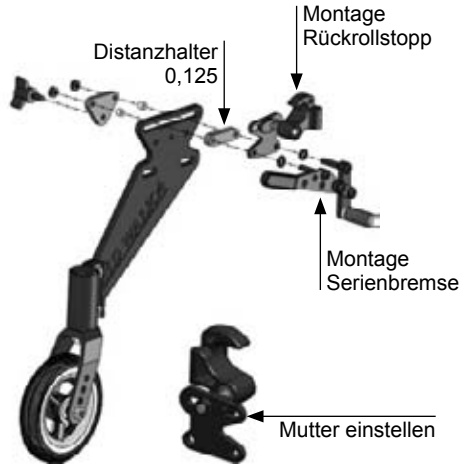

## Gleitende Fußführung KidWalk/KidWalk II Größe 1




### Schritt 1

Die Achsbolzen entfernen und die Vorderräder abnehmen.



### Schritt 2


Nachfolgend finden Sie eine Ansicht der gesamten Führungsvorrichtung.

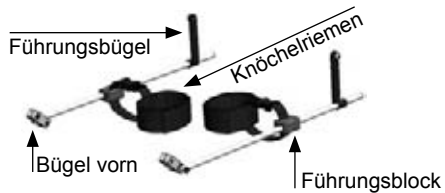


### Schritt 3

Die beiden hinteren Führungsbügel montieren.

Achten Sie darauf, dass die Rohre nach außen weisen!

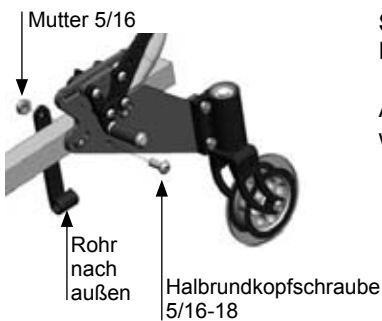


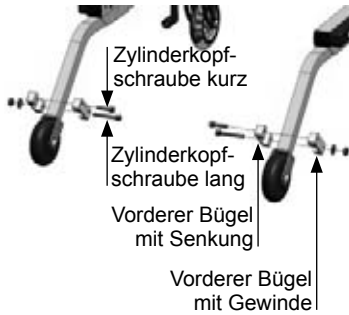

## Schritt 4

Die vorderen Bügelhälften mit der Zylinderkopfschraube montieren.



Die Bolzengewinde müssen nach außen weisen (A).

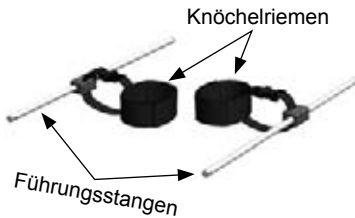

## Schritt 5

Dann die Führungsstangen und Knöchelriemen montieren.

Die Führungsstangen in die hinteren Führungsrohre (A) einschieben und die Führungsstangen mit einer 1/4" Mutter (B) fixieren.

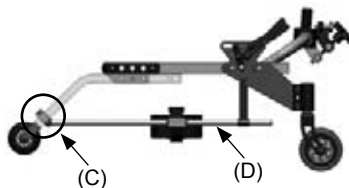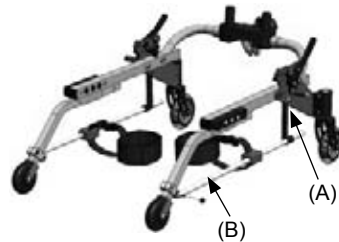

## Schritt 6

Die vorderen Bügel (C) bei montierten Vorderwädern nach oben oder unten schieben, bis die Führungsstange (D) parallel zum Boden ist, dann fest anziehen.



## Gleitende Fußführung KidWalk/KidWalk II Größe 2




### Schritt 1

Die Achsbolzen entfernen und die beiden Vorderräder abnehmen.



### Schritt 2


Nachfolgend finden Sie eine Ansicht der gesamten Führungsvorrichtung.

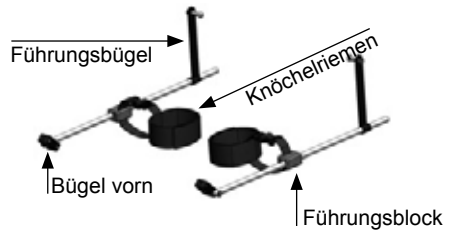


### Schritt 3

Die beiden hinteren Führungsbügel montieren.

Achten Sie darauf, dass die Rohre nach außen weisen.

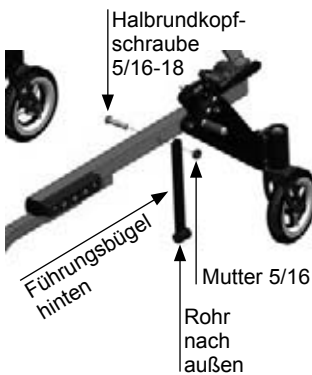




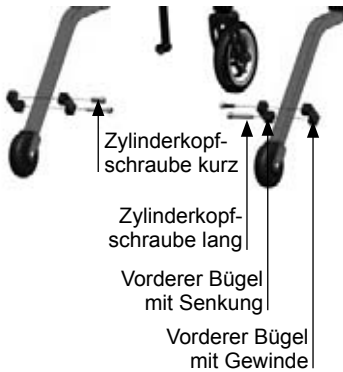

## Schritt 4

Die vorderen Bügelhälften mit den Zylinderkopfschrauben montieren.



Die Bolzengewinde müssen nach außen weisen (A).

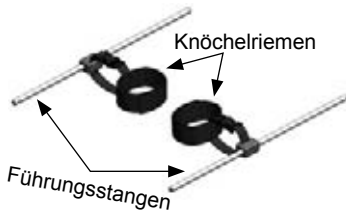

## Schritt 5

Dann die Führungsstangen und Knöchelriemen montieren.

Die Führungsstangen in die hinteren Führungsrohre (A) einschieben und die Führungsstangen mit einer 1/4" Mutter (B) fixieren.

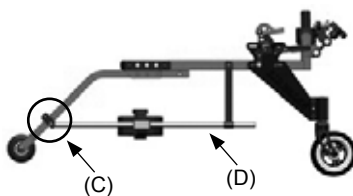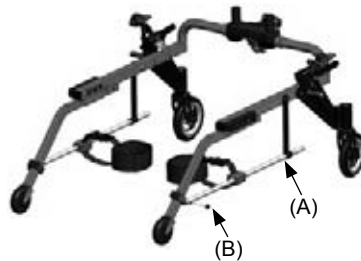

## Schritt 6

Die vorderen Laschen (C) bei montierten Vorderrädern nach oben oder unten schieben, bis die Führungsstange (D) parallel zum Boden ist, dann fest anziehen.



# BESCHRÄNKTE GARANTIE

Die Garantie wird gegenüber dem ursprünglichen Käufer des Prime Engineering Produkts gewährt. Die vorliegende Garantie gilt für das dynamische Mobilitätssystem **KidWalk/KidWalk II**. Prime Engineering, Inc. („das Unternehmen“) wird das Produkt, bei dem ein Mangel infolge eines Material- oder Fertigungsfehlers festgestellt wird, während der nachfolgend genannten Fristen reparieren oder ersetzen:

- Rahmen:** 3 Jahre gegenüber dem ursprünglichen Käufer und gemäß den nachfolgenden Bestimmungen und Beschränkungen.
- Gurte:** 1 Jahr gegenüber dem ursprünglichen Käufer und gemäß den nachfolgenden Bestimmungen und Beschränkungen.
- Weitere Komponenten:** Für Polsterung, Kunststoffteile, lackierte Oberflächen, Gummiteile, Lager, Lenkräder und andere, oben nicht ausdrücklich genannte Teile besteht eine Garantie bei Material- und Fertigungsfehlern von drei Monaten ab dem ursprünglichen Kaufdatum und gemäß den nachfolgenden Bestimmungen und Beschränkungen.

**Garantiebedingungen:** Diese Garantie gilt ab dem Datum des ursprünglichen Verkaufs an den Endverbraucher. Alle defekten Produkte sind für die Garantieinspektion auf Kosten des Käufers an Prime Engineering oder dessen autorisierten lokalen Händler zu schicken. Bei Bedarf setzen Sie sich bitte mit Prime Engineering unter +1 (800) 827-8263 oder einem vor Ort bzw. in der Nähe ansässigen autorisierten Händler in Verbindung.

**Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse:** Die Garantie gilt nicht für (a) ein mit Seriennummer versehenes Produkt, bei welchem die Seriennummer entfernt oder unleserlich gemacht wurde; (b) ein Produkt, das einer fahrlässigen, missbräuchlichen, falschen, unsachgemäßen Benutzung, Wartung oder Lagerung unterzogen oder außerhalb des Einflussbereichs von Prime Engineering beschädigt wurde, wie jeweils durch Prime Engineering festgestellt; (c) Defekte, die aus einer Nichtbeachtung der Anweisungen der Gebrauchsanleitung seitens des Käufers resultieren. Jegliche Veränderungen oder Erweiterungen des Produkts um nicht autorisierte Teile, die weder von Prime Engineering hergestellt noch bereitgestellt wurden. Die Reparatur oder der Ersatz eines defekten Teils oder Produkts durch Prime Engineering stellt den einzigen und ausschließlichen Garantieanspruch des Käufers dar. Die Arbeitsstunden für die Reparatur/Servicegebühren werden nicht von dieser Garantie abgedeckt und fallen nicht in den Verantwortungsbereich von Prime Engineering.

**Die obige Garantie gilt ausschließlich und anstelle aller weiteren ausdrücklichen, implizierten oder gesetzlichen Garantien, einschließlich Garantien für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck und Aufbau. In keinem Fall übernimmt Prime Engineering die Haftung für Folgeschäden oder zufällige Schäden.**

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbedingungen Ihres Landes. Nähere Informationen zu den Garantiebedingungen erteilt das Fachpersonal, dass das Produkt angepasst hat.





## **Prime Engineering**

A Division of Axiom Industries, Inc.

4202 W. Sierra Madre Ave.  
Fresno, CA 93722, USA

Gebührenfrei:	+1 (800) 827-8263
Tel.:	+1 (559) 276-0991
Fax:	+1 (800) 800-3355
E-Mail:	<a href="mailto:info@primeengineering.com">info@primeengineering.com</a>
Website:	<a href="http://www.primeengineering.com">www.primeengineering.com</a>

